

## A *TabDop* monitor program telepítése

### WINDOWS XP vagy VISTA operációs rendszer esetén:

1. Telepítse a mellékelt CD-ről az *CDM\_SETUP.EXE* USB perifériakezelő programot.
2. Csatlakoztassa a *TabDop-P* készüléket az USB kábellel a számítógéphez.
3. Állítsa be az új **soros (USB) port azonosítóját** a számítógépen, lehetőleg a **COM1** (vagy a hozzá legközelebbi) értékre. (*Start / Beállítások / Vezérlőpult / Rendszer / Hardware/ Eszközkezelő / Portok / USB to serial port /Port beállítása / Speciális / COM-port száma*)
4. Telepítse a számítógépre a **TabDop-monitor** programot a CD-n lévő **TabDop.exe** program elindításával.
5. Indítsa el a **TabDop programot**. Válassza a **Kartontallózó** lehetőséget. A *Beállítások/ Hardware/Soros port* menüpontnál válassza ki a lehetőségek közül az előzőekben beállított **soros (USB) portot**, majd kattintson a **mérés/új mérés indítása** menüpontra. Megjelenik a **TabDop monitor** képernyő. Kattintson a **piros (felvétel indítása) gombra**.
6. Kapcsolja be a **TabDop-P** készüléket. Az érzékelő homlokfelületét ritmikusan érintgetve a kijelzőn pulzusfrekvencia érték jelenik meg. A PC képernyőjén, pedig a pulzusfrekvencia görbének kell lassan, kb. 5-10 másodperc alatt kirajzolódnia.
7. A program Súgója részletesen ismerteti a program használatát.

### WINDOWS 7 vagy Windows 8 (32 vagy 64 bites) operációs rendszer esetén:

1. Csatlakoztassa a számítógépet az internetre.
2. Csatlakoztassa a **TabDop-P** készüléket az USB kábellel a számítógéphez.
3. A számítógép észleli az új hardvert és felajánlja hogy megkeresi az illesztőprogramot. Válassza az elfogadás lehetőséget.  
(*Ha nem megfelelő az internetkapcsolat, akkor a telepítő CD-n található FTDI mappában is megtalálja az illesztőprogramot (CDM v.2.12.06 WHQL Certified.exe).* A telepítés során a mellékelt installációs utasítások szerint kell eljárni.
4. Telepítse a számítógépre a **TabDop monitor** programot a CD-n lévő **multidoppy\_setup.exe** program elindításával.
5. Indítsa el a **TabDop monitort**. Válassza a **Kartontallózó** lehetőséget. A *Beállítások/ Hardware/Soros port* menüpontnál válassza ki a lehetőségek közül, a felajánlott **soros (USB) portot**, majd kattintson a **mérés/új mérés indítása** menüpontra. Megjelenik a **TabDop\_monitor** képernyő. Kattintson a **piros (felvétel indítása) gombra**.
6. Kapcsolja be a **TabDop-P** készüléket. Az érzékelő homlokfelületét ritmikusan érintgetve a kijelzőn pulzusfrekvencia érték jelenik meg. A PC képernyőjén, pedig a pulzusfrekvencia görbének kell lassan, kb. 5-10 másodperc alatt kirajzolódnia.
7. A program Súgója részletesen ismerteti a program használatát.

***Ha a telepítés közben problémája adódik, akkor a 46-431-395 vagy a 46-369-377 telefonszámokon kérhet segítséget.***